


INSTRUCCIONES DE USO DE LA JERINGA AUTODESTRUCTIBLE

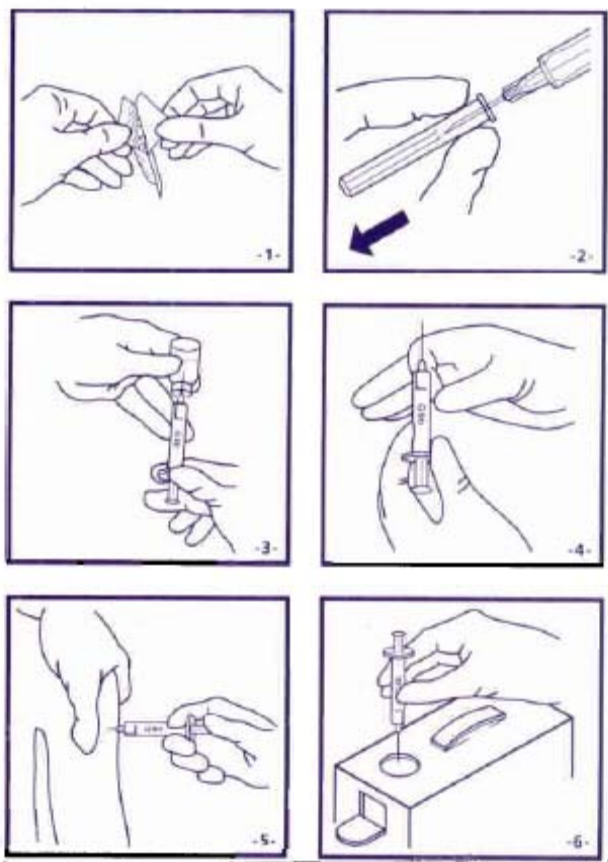

1. Verifique que el empaque de la jeringa no esté dañado y/o abierto. En cualquier de estos casos deséchela.
2. Abra el extremo del empaque y retire la jeringa.
3. Limpie la superficie del frasco-ampolla con alcohol y deje que se seque al aire.
4. Remueva el protector de la aguja. No mueva el émbolo ni trate de inyectar aire en el frasco-ampolla ya que esto bloqueará la jeringa.
5. Levante e invierta el frasco-ampolla e inserte la aguja.
6. Mantenga la punta de la aguja en el líquido en todo momento, no dejando que entre aire a la jeringa. Podría

causar una dosis incorrecta. Hale el émbolo lentamente para llenar la jeringa. El émbolo se detendrá automáticamente justo después de la marca de los 0.5 ó 1 ml.

7. Para eliminar las burbujas de aire, retire la aguja del frasco y, sosteniendo la jeringa en posición vertical, golpee la camisa para desplazar las burbujas hacia la punta de la jeringa. Hale el émbolo para permitir que entre aire a través de la aguja hasta que dicho aire entre en contacto con el aire en la camisa de la jeringa.
8. Luego empuje con cuidado el émbolo hasta la dosis (0.5 í 1 ml), expulsando así la burbuja de aire.
9. Administre la inyección de acuerdo a las instrucciones clínicas.
10. Empuje el émbolo hasta el final para administrar la dosis correcta. El émbolo se bloqueará automáticamente para prevenir que la jeringa vuelva a ser utilizada.
11. Deseche la jeringa SoloShot™IX inmediatamente en un recolector para cortopunzantes.
12. No tape la aguja.

Visite la pagina WEB
<http://www.ops.org.bo/rubeola>